

Smartwatch Samsung e Dexcom G5/G6

Come configurare gli smartwatch Samsung compatibili per visualizzare le glicemie rilevate dall'app Dexcom G5/G6.




Per impostare gli smartwatch Samsung per visualizzare le glicemie rilevate da Dexcom G5 o G6 con app è necessario avere almeno un follower attivo.

Come procedere:


Scaricare l'app xDrip+ dal seguente link, scorrere in giù, cliccare se assets e poi sulla prima voce che termina per apk. <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>

Installare l'app concedendo tutti i permessi.

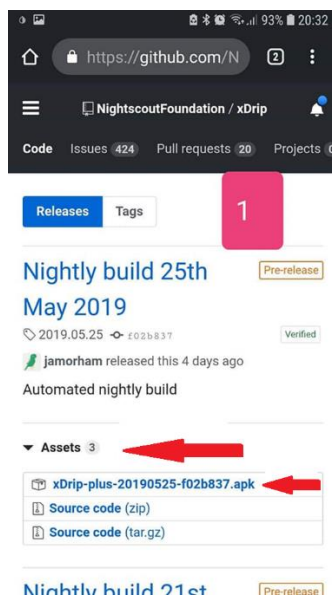


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie


Nella prima videata selezionare Other . ATTENZIONE: non selezionare G5 o G6, ma Other!

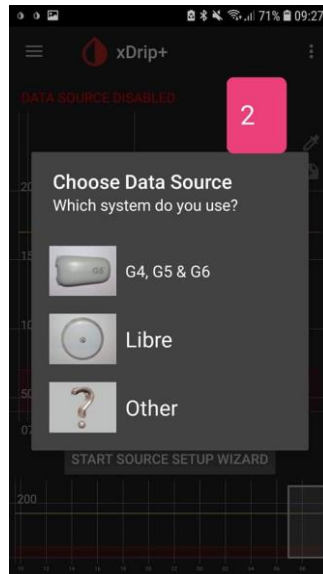


Selezionare Dex Share Follower

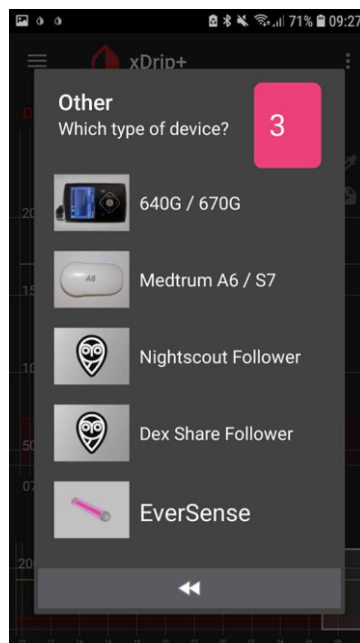


Inserire nome utente dell'app Dexcom e premere fatto

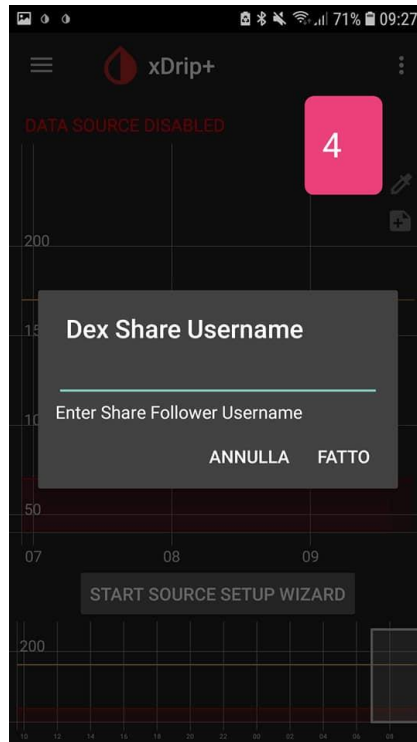

Inserire password di Dexcom e cliccare fatto

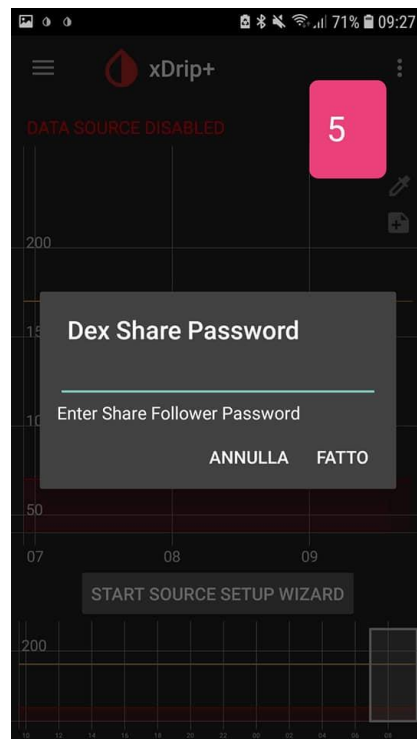

Togliere il flag (abbiamo account europeo) e cliccare fatto.

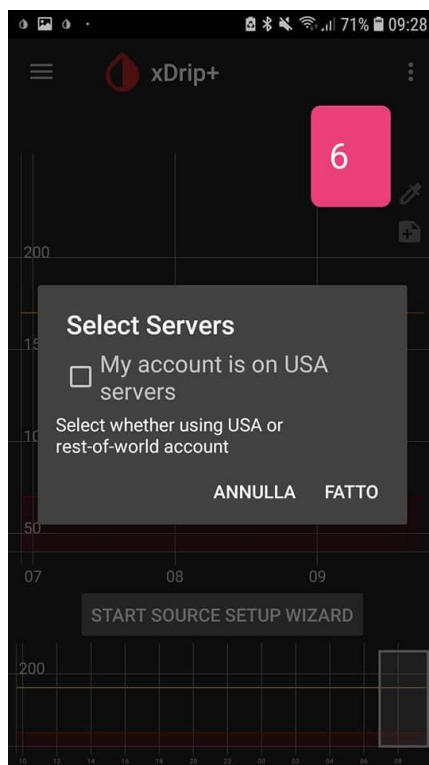


Dopo qualche istante se è tutto ok vedrai le glicemie riportate su xDrip.

Ora scarica l'app Wearable Widgets e aprila

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearablewidgets&hl=it>

Clicca sul + e cerca xDrip+ dall'elenco. Selezionalo.

Alla fine dovresti ottenere una schermata simile:

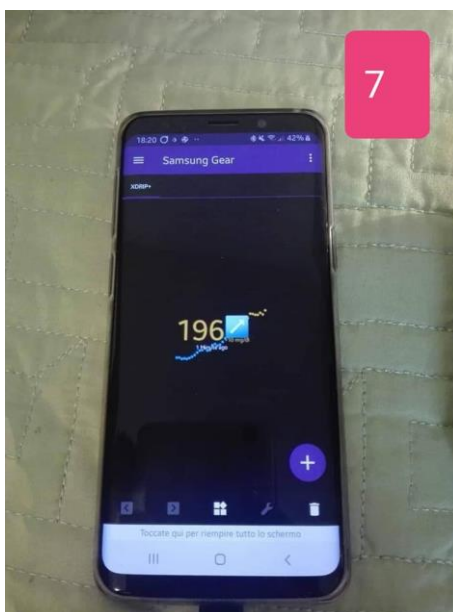

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Ora apri l'app Samsung e clicca sul Galaxy store.

Cerca wearable widget e lo scarichi. Così facendo il quadrante con le glicemie si installerà sull'orologio.

