

Creazione di follower xDrip+

Questa guida passo passo spiega come creare un follower xDrip+, per ricevere la glicemia direttamente dal telefonino master xDrip+.

È necessario un telefono Android dalla versione 5 in su, sopportando Bluetooth 4.2 (BLE) se vuoi collegare un sensore o uno smartwatch.

Nel caso di un telefonino senza Google Play, la funzione Sync Follower (senza Nightscout) non è disponibile.

Se vuoi installare xDrip+ sul telefonino di un bambino, Play Protect va disabilitato temporaneamente.

Non c'è limite al numero di follower.


La guida originale del creatore di xDrip+ @jamorham è disponibile qua

<https://www.youtube.com/watch?v=LcgjfbYcWkE>

1. Imposta il master

Sullo smartphone principale, quello abbinato al sensore, raggiungi il menù impostazioni, seleziona “Impostazioni xDrip+ Sync” e inserisci il flag “Imposta come Telefono Principale” come da foto. Questo serve per impostarlo come telefono master: sarà lui a mandare la glicemia in rete.

Solo il telefonino collegato al trasmettitore deve essere principale.

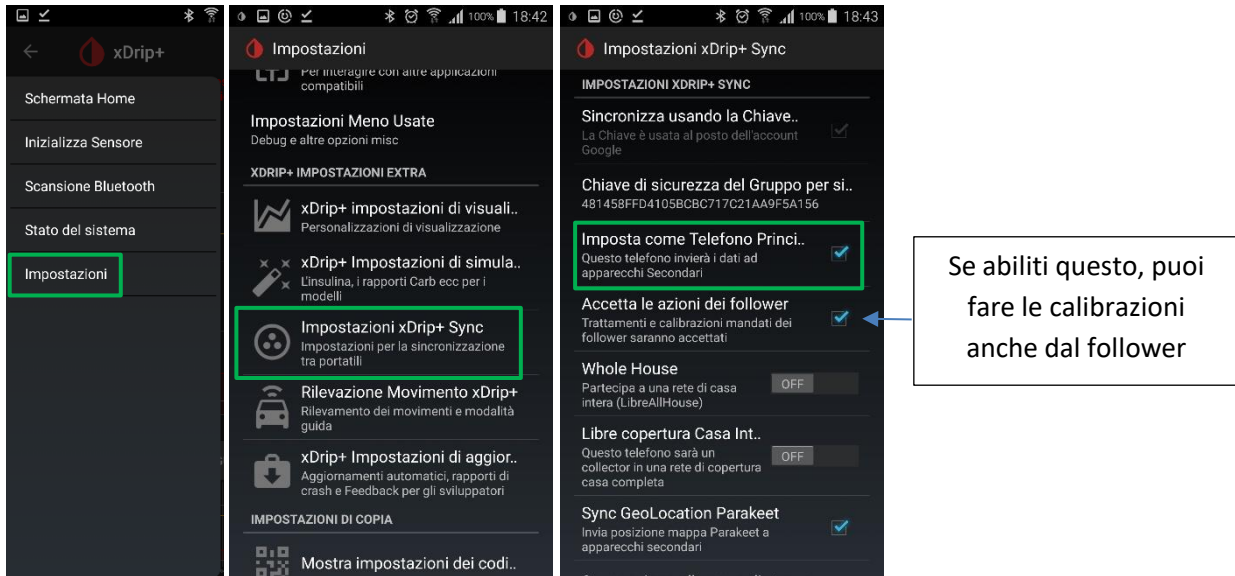


Questa è la chiave che consentirà di collegare i vari followers. Ne viene generata una nuova ogni volta che installi xDrip+. Se vuoi usare la funzione xDrip+ Sync follower, deve essere identica su tutti i telefonini.

Chiave di sicurezza del Gruppo per si..
481458FFD4105BCBC717C21AA9F5A156

[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)


Ora prendi lo smartphone Android sul quale vuoi ricevere le glicemie e installa seguendo la guida base <https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/>. La versione non deve essere necessariamente uguale a quella del master.

Raggiungi le impostazioni, clicca su “Dati Hardware di origine” e seleziona “xDrip+ Sync Follower”

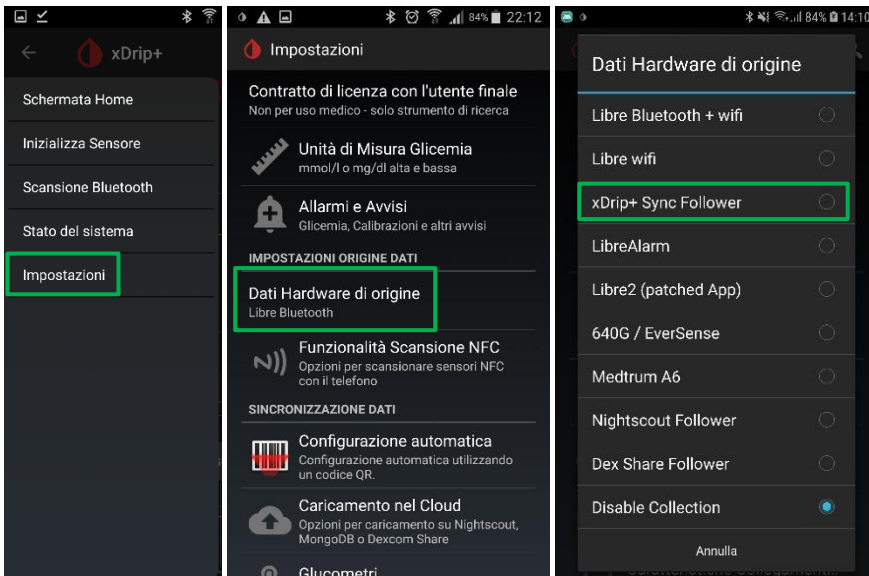

Raggiungi, sempre dalle impostazioni, la voce “Impostazioni xDrip+ Sync” e verifica che la voce “Imposta come Telefono principale” sia disabilitata.

Posizionati su “Handset Group Security Sync Key”

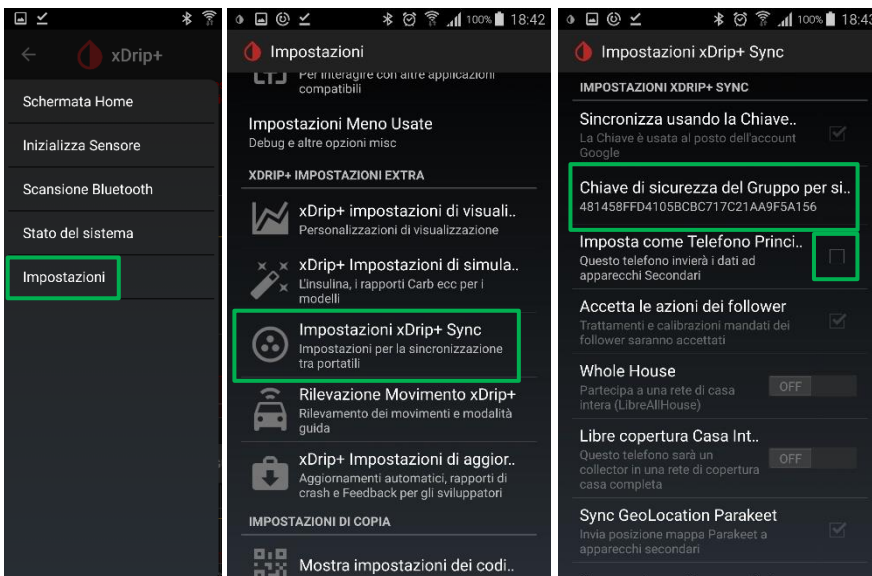


Prendi il telefono primario e copia la chiave sul telefono secondario. Premi OK alla fine.

Se trovi la copia difficile (la stringa è lunga e con telefonini piccoli molto difficile) usa la funzione di copia tramite fotocamera.

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie


Sullo smartphone principale vai in Impostazioni e scendi fino a “Mostra impostazioni dei codici QR”.

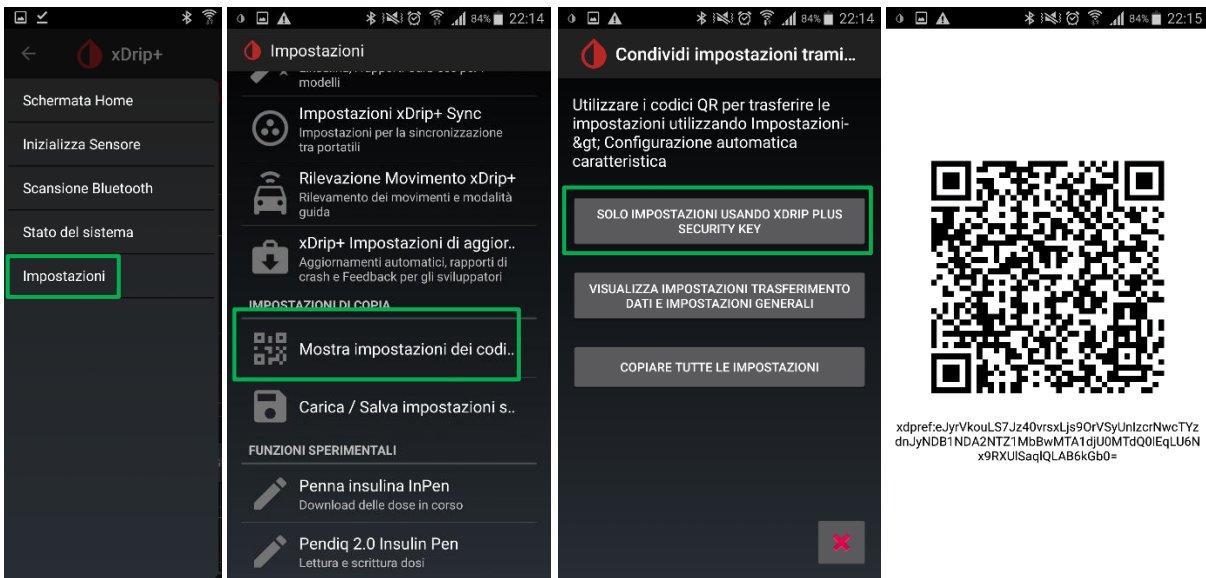


Sul telefono follower invece vai in Impostazioni quindi “Configurazione automatica”.

Dai l'autorizzazione a xDrip+ di usare la fotocamera.

Inquadra il codice QR del telefonino master per copiare i codici di sicurezza.

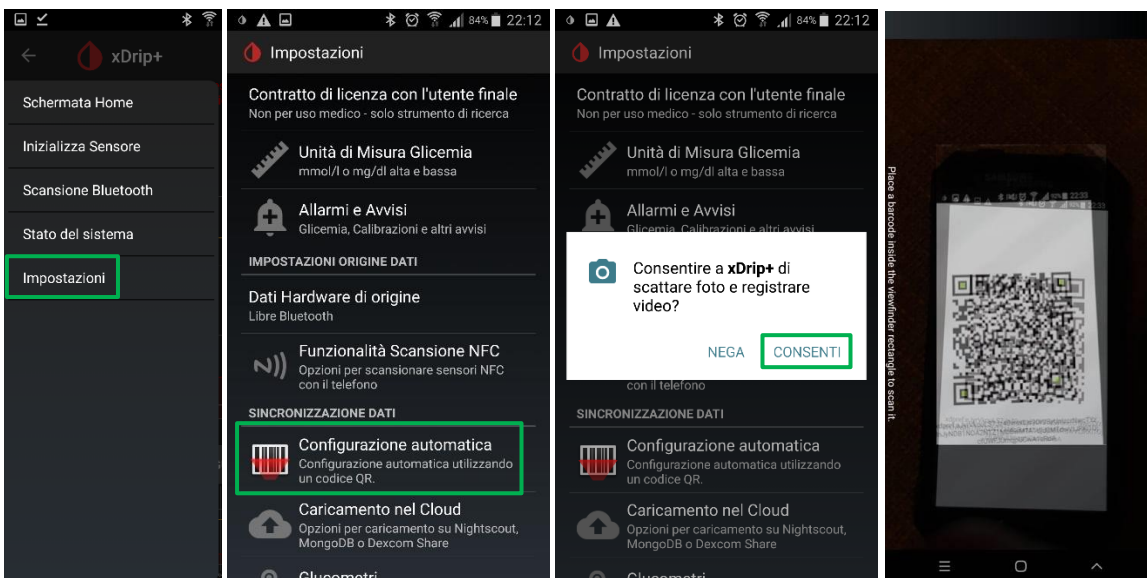

Dopo qualche istante i due dispositivi saranno abbinati 😊

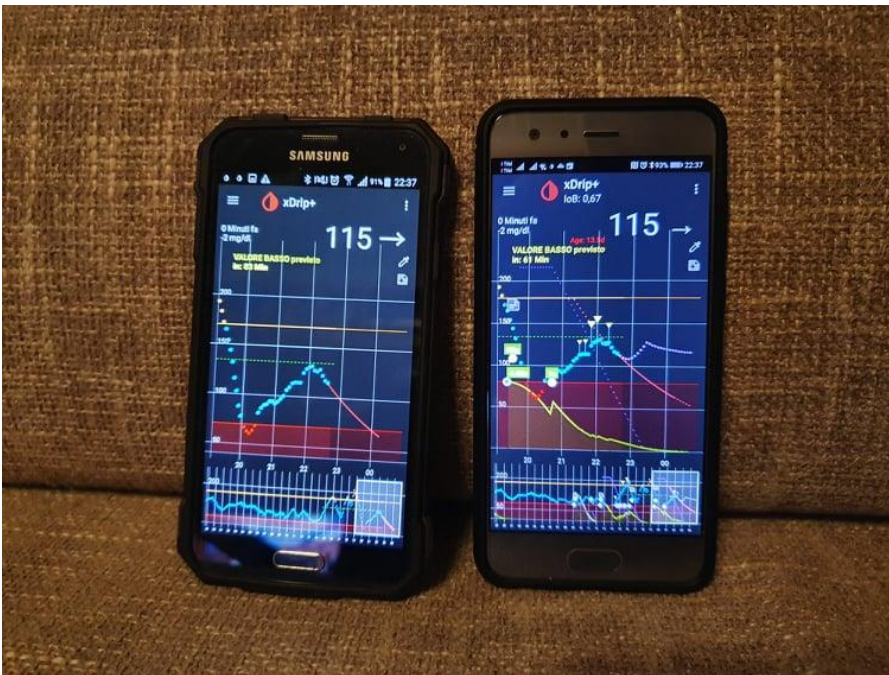

Contatti



[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)



glicemiadistanza@gmail.com