

xDrip+ come compagno dell'app MASTER

Dexcom G6, G7, ONE
Medtronic Guardian, Minimed
CamAPS

Questa guida passo passo spiega come usare xDrip+ insieme a diverse app proprietarie.
xDrip+ riceve la glicemia dalle notifiche dell'app master, senza interferire con sensore ne micro.

Ti permette di sfruttare tutte le funzionalità di xDrip+:

- Allarmi personalizzabili
- Smartwatch
- Follower aggiuntivi non legati ai server del fornitore
- ...

È necessario un telefono Android dalla versione 6 in su.

xDrip+ deve essere installato sullo stesso telefonino dell'app master (collegata al sensore / micro).


Nel caso di un telefonino senza Google Play, la funzione Sync Follower (senza Nightscout) non è disponibile.

1. Installa xDrip+





Segui la guida <https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/> e installa l'ultimo pre-release.

2. Seleziona la sorgente dati Companion App

Dal menu di xDrip+, Impostazioni, Dati Hardware di Origine, seleziona Companion app.

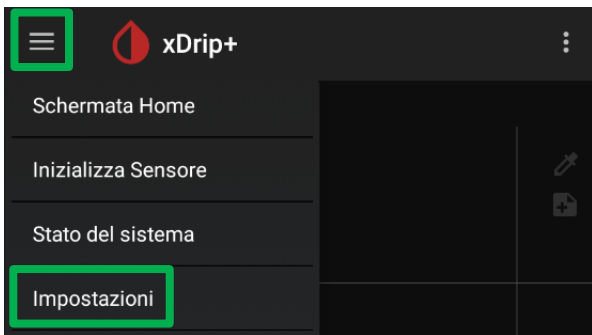

xDrip+ ha bisogno dell'autorizzazione di accesso a tutte le notifiche. Ovviamente non farà nient'altro che ascoltare quelle delle app elencate sopra con l'unico scopo di riprodurre le notifiche. Non usa nessun'altro dato (se non ti fidi studia pure o fai studiare l'app: il codice sorgente è open source, non nasconde niente).

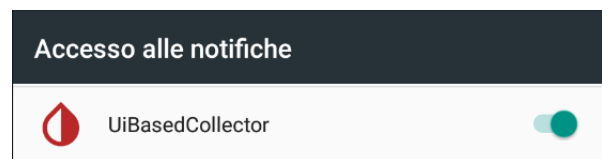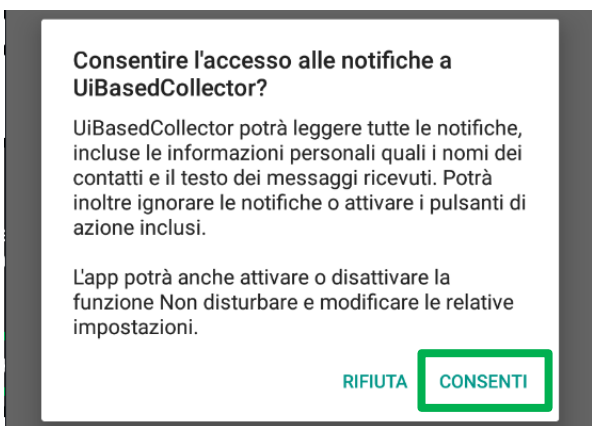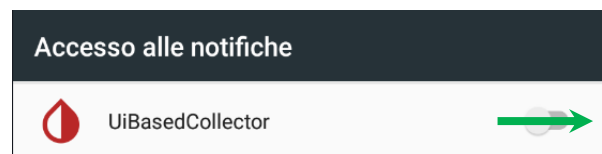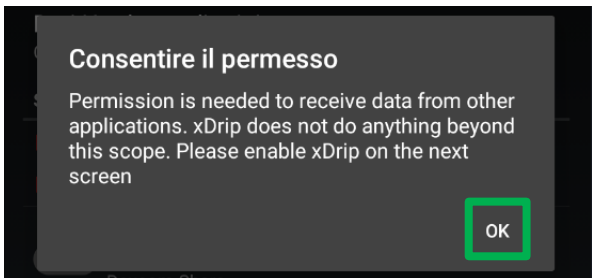

Torna in xDrip+, dovresti vedere le misure arrivare entro 5 minuti.
Semplice, no?

3. Usa xDrip+!

Collega il tuo smartwatch preferito a xDrip+, (verifica prima che sia nella lista).

Amazfit e Xiaomi

[Smartwatch e smartband Xiaomi e Amazfit collegato a xDrip+ con WatchDrip+](#)

Android Wear

[Android Wear OS, come impostare un quadrante con l'app Dexcom master, xDrip+, Glimp o AAPS.](#)

Fitbit

[Le glicemie al polso su Fitbit con Sentinel Pro](#)

[Quadrante duo per smartwatch](#)

[Fitbit: le glicemie di Dexcom, Spike, xDrip+ o Nightscout su smartwatch Versa e Ionic](#)

Samsung

[G-Watch per smartwatch Samsung](#)

Condividi le misure senza passare tramite i server dell'app (quando non vanno, fa comodo) con xDrip+ Sync o Nightscout.

[Condivisione della glicemia tra telefonini Android con xDrip+](#)

Contatti



[**Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie**](#)



[**glicemiadistanza@gmail.com**](mailto:glicemiadistanza@gmail.com)