

xDrip+ come follower di Dexcom G5 e G6: glicemie al polso e widget

Chi usa l'app Dexcom follow può sentire l'esigenza di impostare un quadrante su un orologio Wear OS oppure un widget, in modo da avere la glicemia visibile al polso e sulla schermata di blocco del telefono. Entrambe le funzioni però non sono previste con l'app Dexcom follow.


E' possibile in questo caso usare l'app non ufficiale xDrip+, che può affiancare Dexcom follow sul telefono e sopperire alle funzioni mancanti.



Vediamo come procedere.


Scaricare l'app xDrip+ dal seguente link, scorrere in giù, cliccare su assets e poi sulla prima voce che termina per apk. <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>

Installare l'app concedendo tutti i permessi.

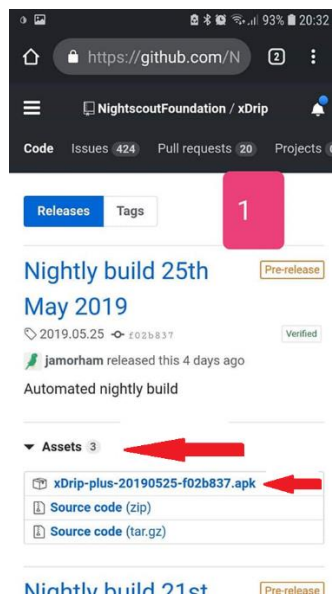


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie


Nella prima videata selezionare Other . ATTENZIONE: non selezionare G5 o G6, ma Other!

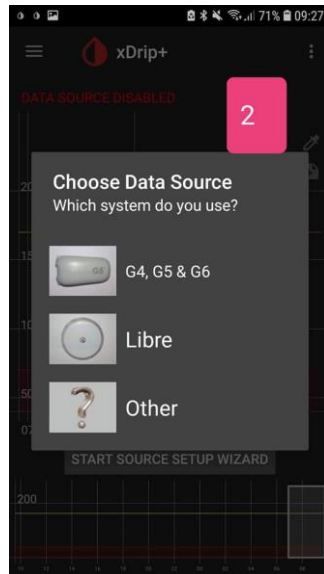


Selezionare Dex Share Follower e confermare.

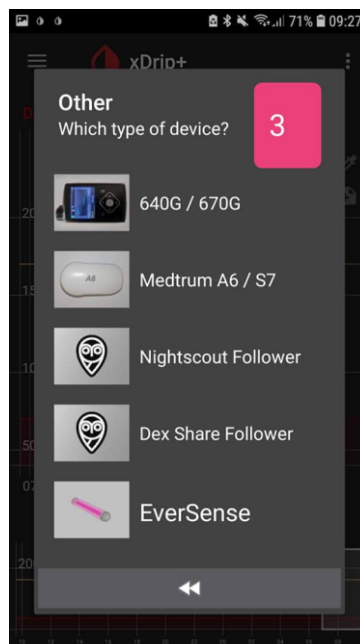

Inserire nome utente dell'app Dexcom e premere fatto.

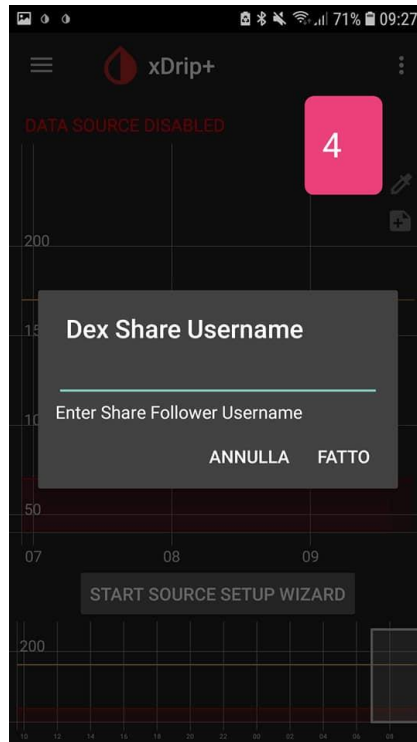


Inserire password di Dexcom e cliccare fatto.

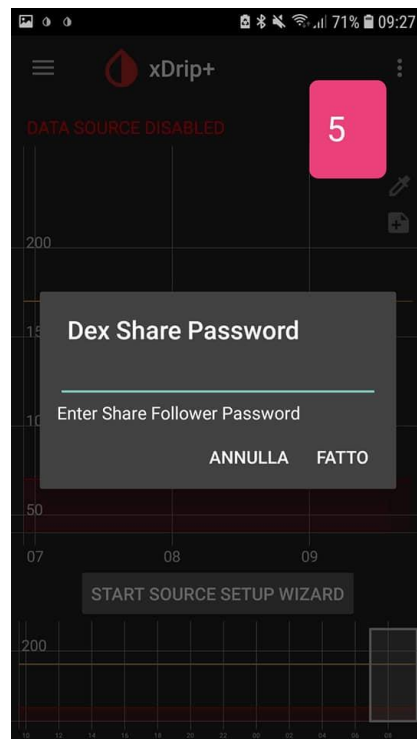


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Togliere il flag (perché abbiamo account europeo) e cliccare fatto.

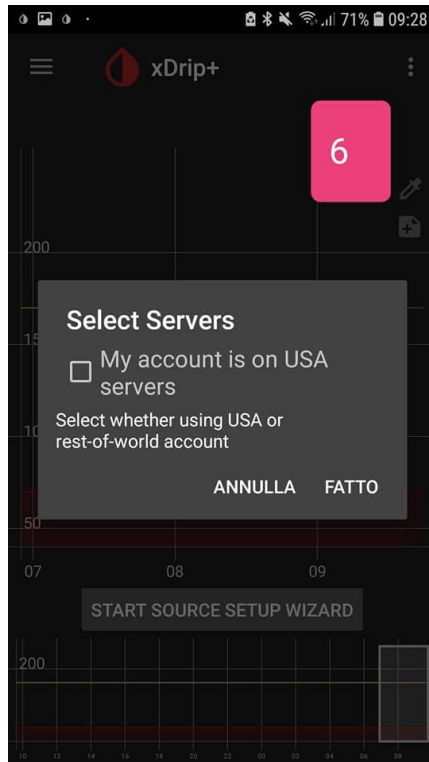


Dopo qualche istante se è tutto ok vedrai le glicemie riportate su xDrip+

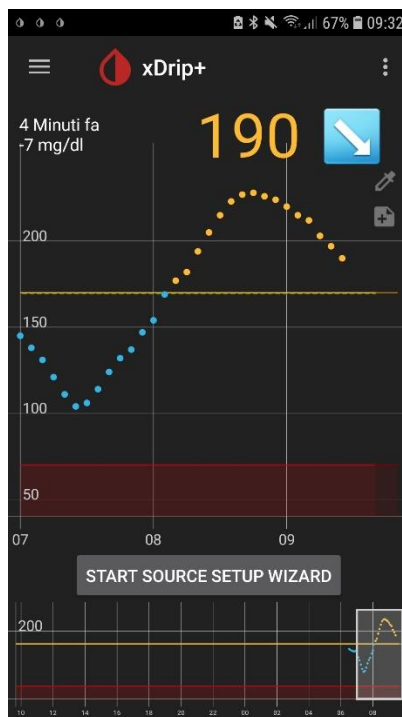


Installare e configurare xDrip+ sullo smartwatch

Dall'app xDrip+ sul telefono abilitare l'integrazione Android Wear. Questo passaggio è necessario per installare xDrip+ sullo smartwatch.

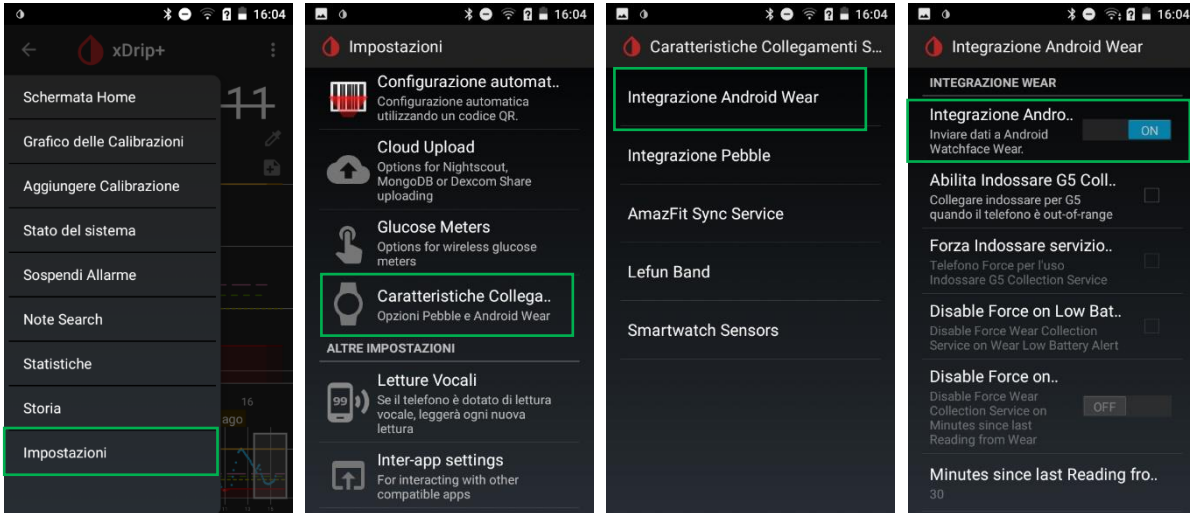


Sullo smartwatch seguite la guida introduttiva fino a quando vi lascia premere il tasto in alto destra per aprire le applicazioni. Selezionare Play Store.

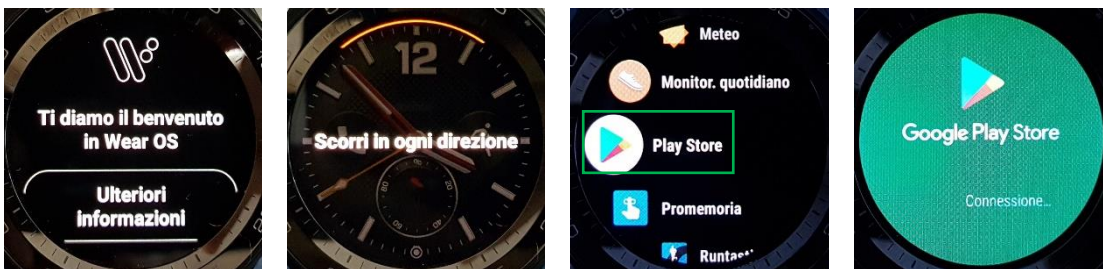

Una volta entrati in Play store scorrere giù fino a trovare le App sul telefono. Se l'abilitazione di Wear in xDrip+ sul telefono è andata a buon fine dovrebbe comparire sullo smartwatch.


Installare xDrip+.

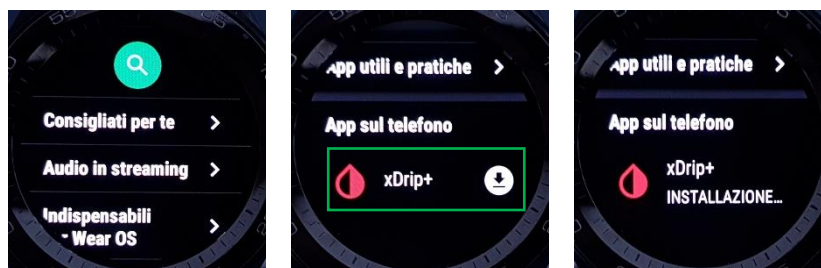

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Adesso si può selezionare la watchface xDrip+.

Sullo smartwatch, nella schermata di base (orologio) o scorrendo verso il basso per fare comparire il menu. (NB: Si può anche raggiungere dalle applicazioni con il tasto alto destra).

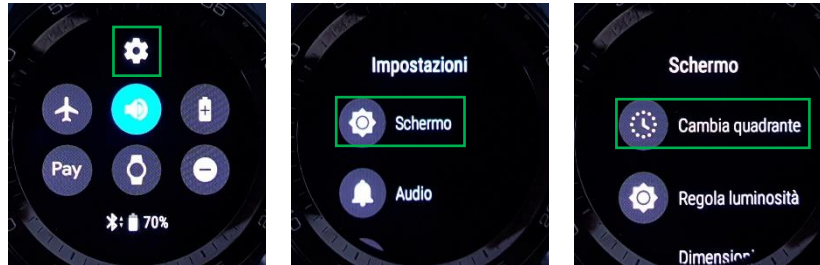

NB: Si può anche raggiungere con un tocco lungo sulla schermata di base.

Scorrere la lista a destra fino a "Scopri altri quadranti" e selezionare.

Scorrere giù fino a raggiungere quelli xDrip+. Selezionarne uno.



Confermare la selezione e tornare alla schermata dell'orologio.

Dopo poco tempo comparirà la glicemia.




Avete adesso la vostra glicemia al polso. La lettura viene eseguita dal telefonino che la trasmette allo smartwatch.


Impostare il widget sulla home e schermata di blocco

xDrip+ possiede un widget che permette di vedere il valore glicemico e il grafico sulla home del telefono e sulla schermata di blocco. I metodi per impostare il widget variano da modello a modello. Nel nostro caso utilizziamo un Samsung Galaxy S7.

Tenere premuto lo schermo in un punto vuoto, selezionare il menù widget che appare

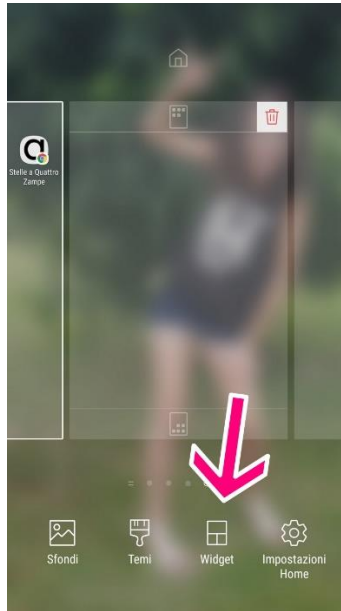

Cercare xDrip e selezionarlo.

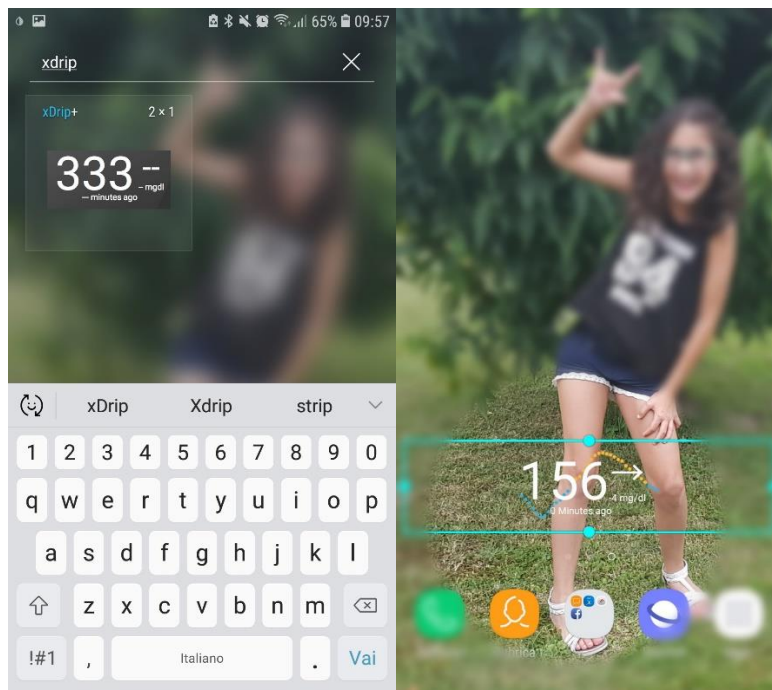

Gruppo Facebook: [Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)