

## Smartwatch Amazfit con sistema operativo ZEPP OS con xDrip+ usando WatchDrip+

Questa guida spiega come visualizzare la glicemia di xDrip+ con un smartband:

Amazfit GTR3 PRO  
Amazfit GTR3  
Amazfit GTR4  
Amazfit TRex2  
Amazfit GTS3  
Amazfit GTS4  
Amazfit GTS4 Mini  
Amazfit Band7  
Amazfit Falcon

Ringraziamo Artem (Github @bigdigital) per [questo bellissimo progetto](#).

È necessario un telefono Android dalla versione 5 in su, sopportando Bluetooth 4.2 (BLE).

Prima di cominciare, carica l'orologio.


### 1. Installa xDrip+

Segui la guida base per installare xDrip+ e non proseguire fin quando non si vede la glicemia in xDrip+.


<https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/>

Assicurati di avere la versione di xDrip non precedente al 10.07.2022. Se è più vecchio, devi aggiornare xDrip.

Dal menu di xDrip+, vai in Caratteristiche Collegamenti Smartwatch, MiBand e **DISABILITA** Usa MiBand!

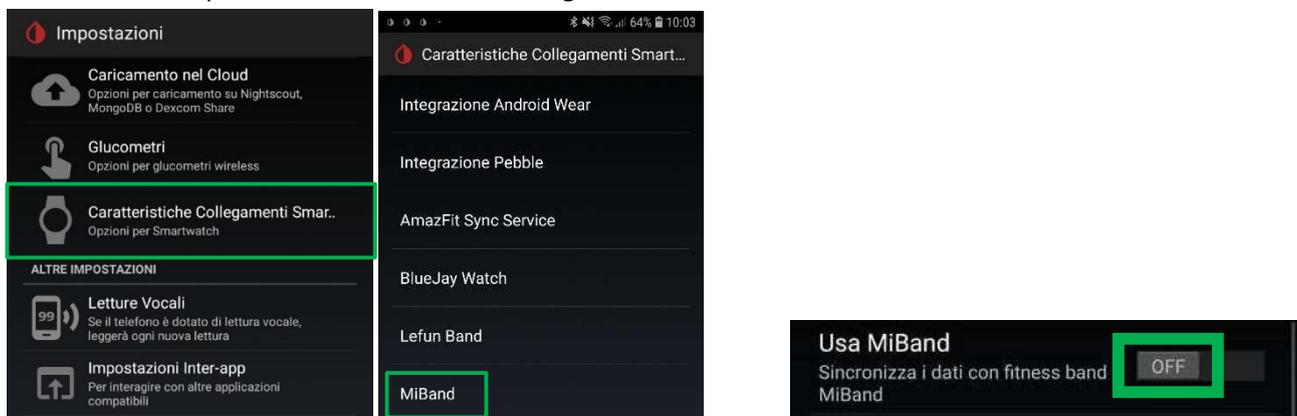

Dal menu di xDrip+, vai nelle impostazioni Inter-app e abilita il servizio di trasmissione API (in fondo giù)

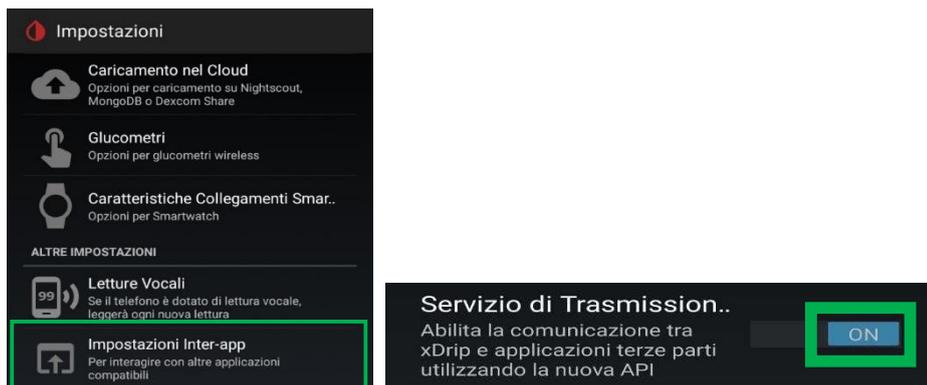


## 2. Configurazione WatchDrip+

Installa l'app WatchDrip+ [Ver 0.2.6](#)

Attiva la casella di controllo "**Abilita servizio**" nella schermata principale e consenti tutte le autorizzazioni che verrebbero richieste.

Attiva la casella di controllo "**Enable web server**"

Disattiva *la* casella di controllo "**Enable device**" poiché i dispositivi Zepp non comunicano direttamente con l'app Watchdrip.

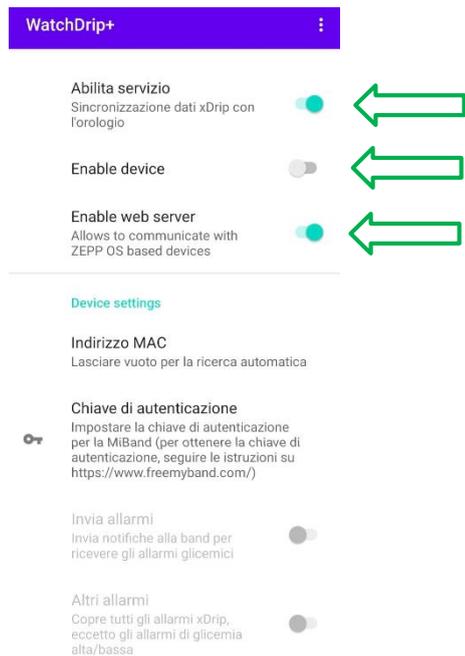

## 3. Installa l'app Zepp

Clicca sul seguente link per scaricare l'app dal PlayStore:


[Zepp \(formerly Amazfit\)](#)




## Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

E collega il tuo orologio.

Attiva la modalità sviluppatore, per questo vai su **“Profilo”** -> **“Impostazioni”** -> **“Informazioni”** e fai clic sull'icona **Zepp 7** volte di seguito finché non viene visualizzata una finestra pop-up

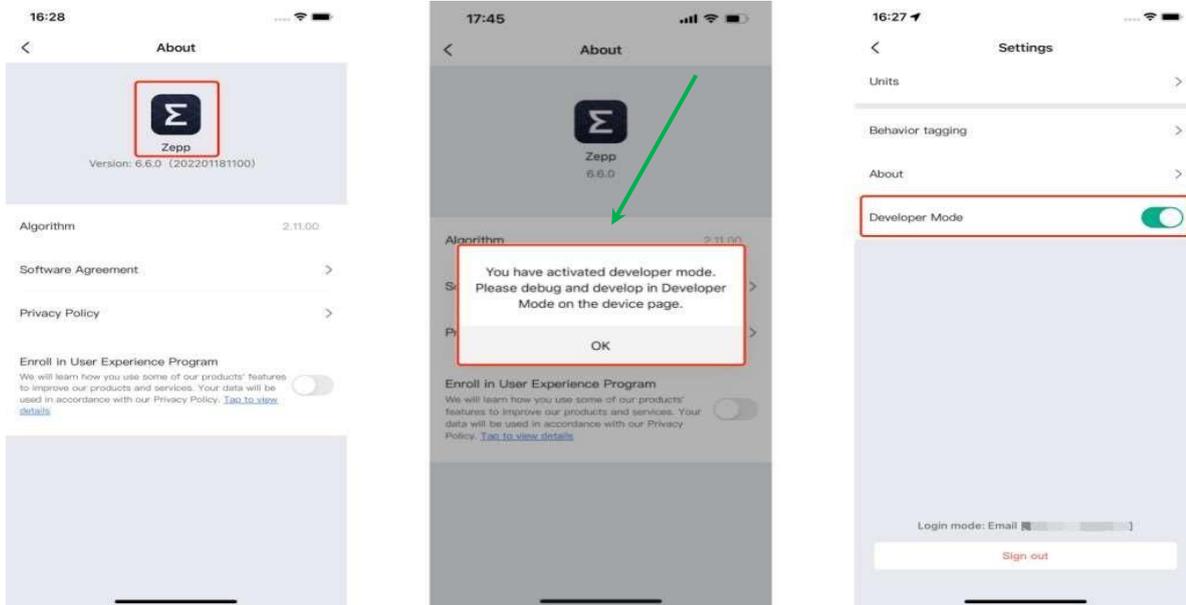

Ora l'applicazione personalizzata e il codice QR del quadrante possono essere scansionati e installati sul dispositivo utilizzando la funzione **"Scan"**.

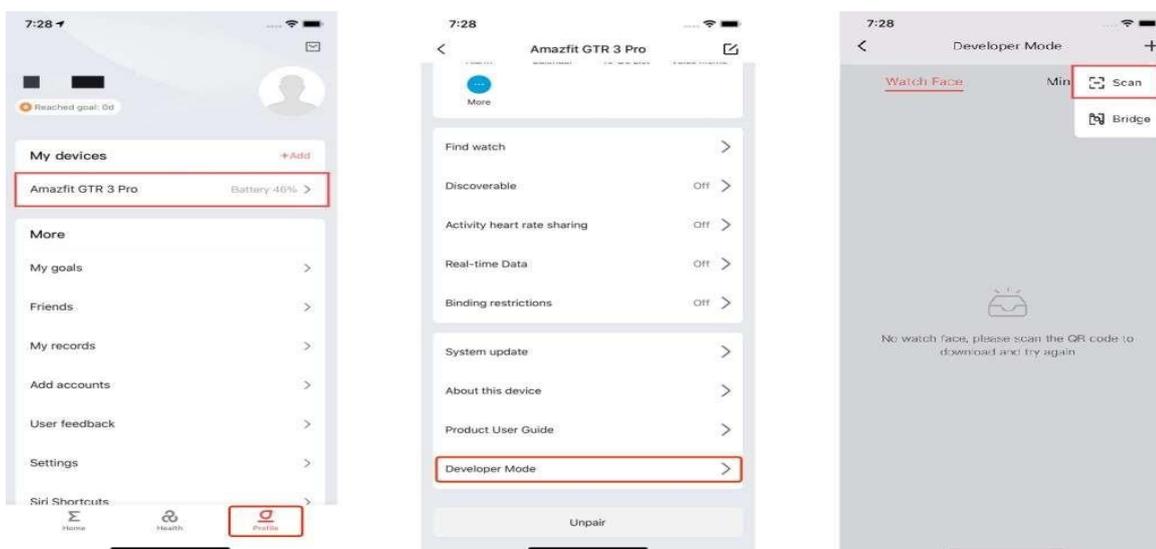

#### 4. Installa l'applicazione per l'orologio Watchdrip+


Utilizzando il codice QR riportato di seguito installa l'applicazione Watchdrip+ per l'orologio.

È la stessa per tutti i dispositivi Amazfit ZEPP OS.

Per Zepp app v7.7.0 e successive.

L'app orologio è universale e al momento supporta i seguenti dispositivi Amazfit GTR3 PRO, Amazfit GTR3, Amazfit TRex2, Amazfit GTS3, Amazfit GTS4, Amazfit GTR4, Amazfit GTS4 Mini, Amazfit Band7, Amazfit Falcon.

Se non è presente un **Watchface** per il tuo dispositivo, è possibile vedere il valore BG nell'app **Watchdrip Watch**.

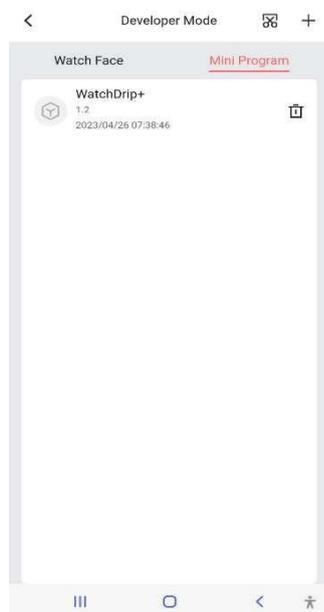


## 5. Installa il file Watchface

utilizzando i **codici QR** per il dispositivo appropriato dal seguente link:

[ZEPP OS QUADRANTI](#)



Quando esegui la scansione del **codice QR** del quadrante, fai clic sul pulsante " **Installa** " vicino all'elemento del quadrante per installare questo **WF** sul tuo dispositivo.

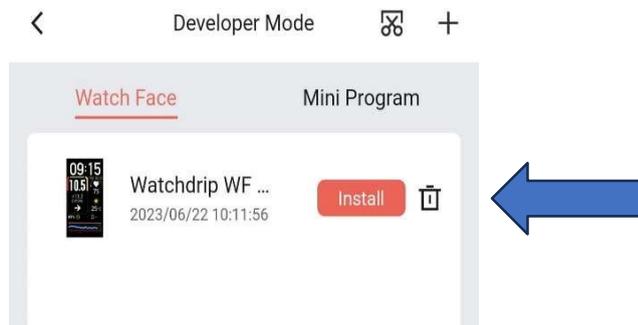

Una volta collegato, aspetta la prossima lettura di xDrip+ e dovresti vederla comparire anche in WatchDrip+. E sullo smartwatch...



Altri quadranti sono visibili su [watchdrip.org](http://watchdrip.org)

## Xiaomi Smart Band 7

La Xiaomi Smart Band 7 è stata sviluppata dalla società Zepp e si basa sul sistema operativo Zepp come tutti gli ultimi dispositivi Amazfit. Ciò rende possibile scrivere programmi che funzionerebbero direttamente sull'orologio. Ma a causa di alcune preoccupazioni, Xiaomi non ha implementato un'API di comunicazione nell'app Zepp Life. Ciò rende impossibile la comunicazione tra il telefono e l'orologio, pertanto non era disponibile il supporto per watchdrip per questo dispositivo. Ma recentemente è stato trovato un modo complicato per farlo funzionare. Mascherando il dispositivo Xiaomi Band 7 con Amazfit Band 7.

Per poter utilizzare Xiaomi Smart Band 7 con watchdrip è necessario associare l'orologio all'app Zepp ( non Zepp life! ) progettata per i dispositivi Amazfit

Associazione con l'applicazione Amazfit Zepp

Se hai già installato l'app Zepp , disinstallala.

Se la tua Miband è già abbinata, apri l'app Zepp Life e annulla l'abbinamento.

Scarica e installa l'app [Zepp](#) modificata da [melianmiko](#)

Accedi al tuo account Zepp o Zepp Life e associa Mi Band 7.

Dopo l'associazione dovresti vedere un dispositivo Amazfit Band7 nell'elenco delle app (questo è il tuo MiBand7)

Disinstalla l'applicazione modificata e installa l'app Zepp originale (non Zepp Life) da Google Play. Accedi con lo stesso account che utilizzi durante l'abbinamento

Successivamente, è possibile installare l'app Watchdrip Watch e il watchface come descritto sopra per altri [dispositivi con sistema operativo ZEPP](#)

Se non riesci ad associare il tuo braccialetto utilizzando l'app con patch sopra, puoi provare [l' app con patch alternativa](#) creata da Artem.

Il progetto originale

[Supporto per dispositivi con sistema operativo ZEPP – Blog Artem \(bigdigital-home-blog in italiano\)](#)

## [Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)

[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#) nasce come gruppo Facebook nell'Agosto 2017 con lo scopo di informare ed assistere le persone affette da diabete tipo 1 sulle nuove tecnologie a disposizione. In questi anni abbiamo steso e aggiornato numerose guide utili alla visione a distanza delle glicemie con i sensori attualmente in commercio in Italia, totalmente in maniera gratuita grazie al principio che ci lega da sempre, cioè quello nato dalla [Nightscout Foundation: WeAreNotWaiting](#).

**L'utilizzo è soggetto all'assunzione di esclusiva responsabilità personale.**

[Indice guide - Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)

## *Contatti*



[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)

*Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie*

