



[Sugarmate](#) follower di [Dexcom](#), [Nightscout](#) e [Gluroo](#)

L'app Sugarmate, un partner autorizzato di Dexcom Data, offre una soluzione moderna per CGM tramite un'ampia gamma di strumenti di visualizzazione e integrazioni per semplificare la gestione della glicemia.

Dispositivi supportati:

- Apple iPhone
- Apple iPad
- Smartphone Android (puoi salvare l'app web sulla schermata home)
- Apple Watch, scarica l'app da [qui](#)
- Apple Mac
- Browser Web (anche su Windows): Chrome, Safari, Firefox ed Edge
- Apple CarPlay
- Amazon Alexa
- Integrazione con Siri
- Sincronizzazione con Apple Salute

Sugarmate supporta come sorgente dati:

- Dexcom Share
- Nightscout
- Gluroo

Se vuoi sapere di più clicca su [INFO](#), puoi visitare la pagina FB ufficiale [Sugarmate](#) oppure direttamente sul sito <https://www.sugarmate.io/>.

Se non hai ancora un account [Sugarmate](#) serve crearne uno.


1. Creare un account

Vai sul sito <https://www.sugarmate.io/>. Clicca **Registrati**



The image shows the Sugarmate login interface. At the top, the Sugarmate logo is displayed. Below it, a white box titled "Accedi" contains two input fields: "indirizzo e-mail" and "password". Below the fields are two links: "Registrati" and "Hai dimenticato la password?". At the bottom of the box is a large pink button labeled "Avanti".

Accetta le condizioni di utilizzo e trattamento dei dati, seleziona il tuo paese di residenza.

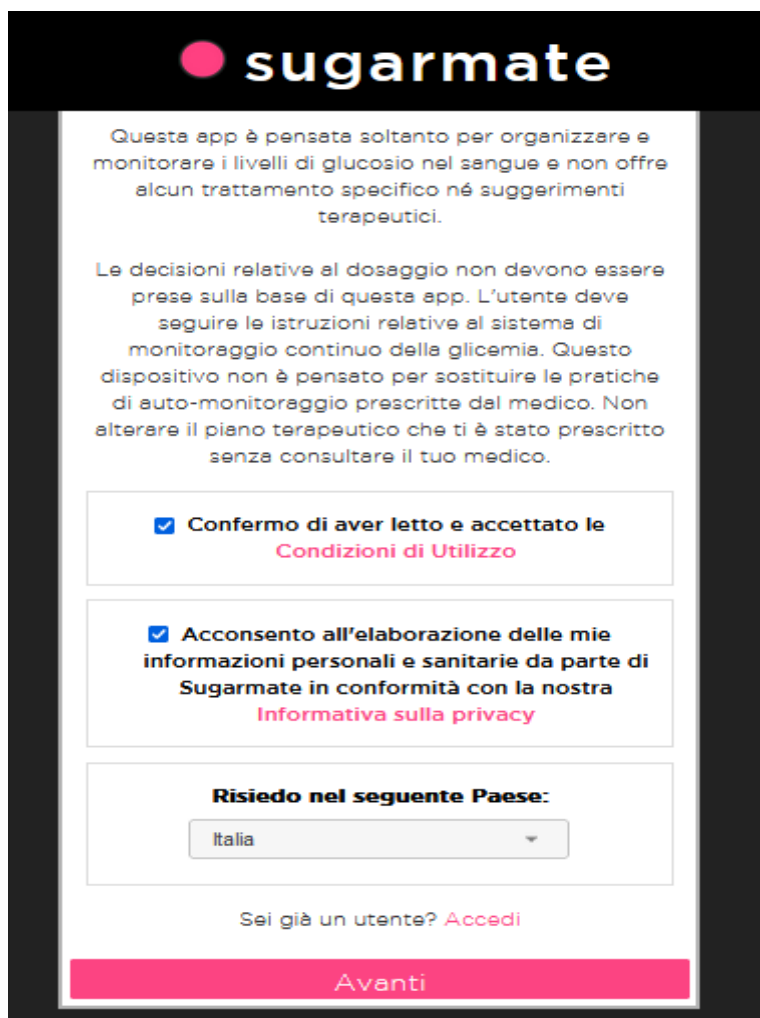

The image shows the Sugarmate terms and conditions page. At the top, the Sugarmate logo is displayed. Below it, a white box contains the following text:

Questa app è pensata soltanto per organizzare e monitorare i livelli di glucosio nel sangue e non offre alcun trattamento specifico né suggerimenti terapeutici.

Le decisioni relative al dosaggio non devono essere prese sulla base di questa app. L'utente deve seguire le istruzioni relative al sistema di monitoraggio continuo della glicemia. Questo dispositivo non è pensato per sostituire le pratiche di auto-monitoraggio prescritte dal medico. Non alterare il piano terapeutico che ti è stato prescritto senza consultare il tuo medico.

Confermo di aver letto e accettato le **Condizioni di Utilizzo**

Accenso all'elaborazione delle mie informazioni personali e sanitarie da parte di Sugarmate in conformità con la nostra **Informativa sulla privacy**

Risiedo nel seguente Paese:

Italia


Sei già un utente? [Accedi](#)

At the bottom of the box is a large pink button labeled "Avanti".

L'utilizzo è soggetto all'assunzione di esclusiva responsabilità personale.

Compila i campi con il tuo indirizzo email e inventati una password che devi conservare.

Clicca **Avanti**

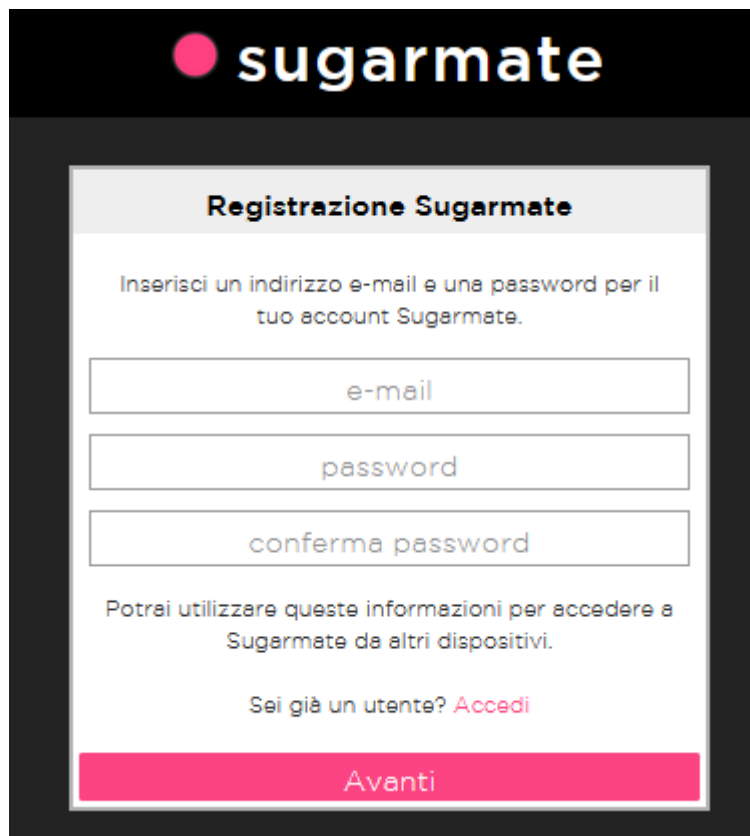

The screenshot shows the Sugarmate registration interface. At the top, the Sugarmate logo is displayed. Below it, the title "Registrazione Sugarmate" is centered. The instructions read: "Inserisci un indirizzo e-mail e una password per il tuo account Sugarmate." There are three input fields: "e-mail", "password", and "conferma password". Below the fields, it says: "Potrai utilizzare queste informazioni per accedere a Sugarmate da altri dispositivi." At the bottom, there is a link "Sei già un utente? [Accedi](#)" and a large pink button labeled "Avanti".

2. Aggiungi sorgente dati Dexcom




The screenshot shows the Sugarmate "Add data source" screen. The title is "Aggiungi sorgente dati". The instructions read: "Aggiungi una sorgente dati affinché Sugarmate possa ottenere le tue ultime letture." There are three buttons: a green button "Connettiti con Dexcom", a pink button "Connettiti con Nightscout", and a grey button "Salta".

Hai la possibilità di scegliere tra Dexcom e Nightscout/Glucoo

Se usi un sensore Dexcom e hai almeno un follower Dexcom funzionale con l'app Follow clicca **Conetti con Dexcom**.



Conferma, acconsenti e clicca **OK**

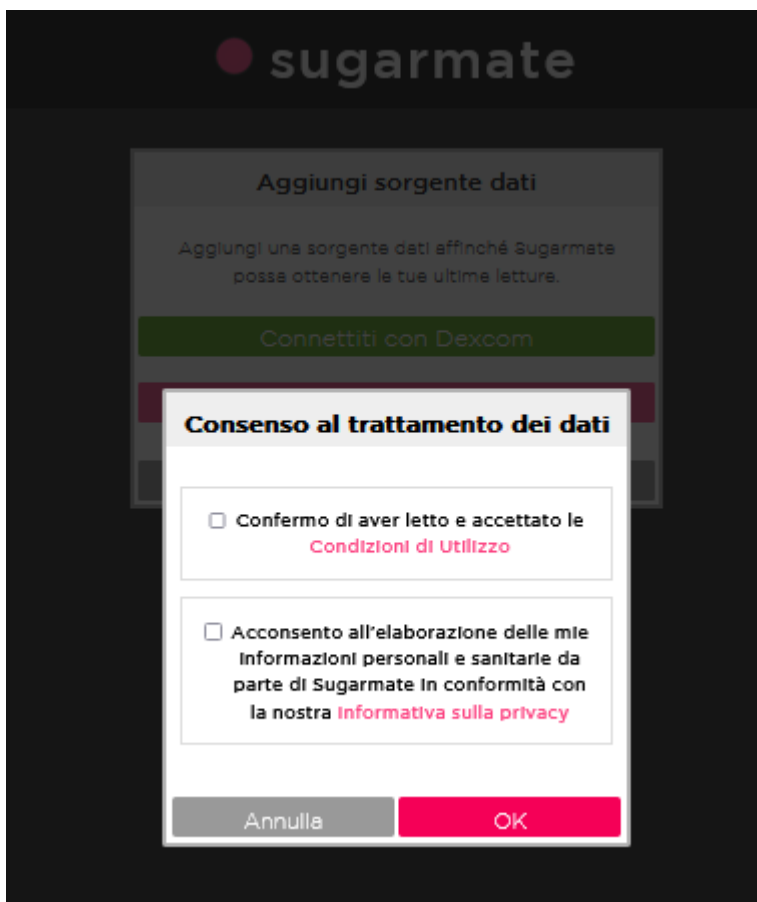

Clicca **Avanti**



Ti verrà chiesto di accedere al tuo account Dexcom.

Inserisci il tuo nome utente e la tua password Dexcom nei campi di immissione del testo e clicca **Accedi**.



Accedi

Iscriviti

ID utente


Inserisci la tua e-mail o il nome utente.

Nome utente/Indirizzo e-mail


Ti sei registrato con il cellulare?

Password

Verrà visualizzata la schermata Sorgente aggiunta correttamente e verranno visualizzati i passaggi da seguire in assenza dei dati.

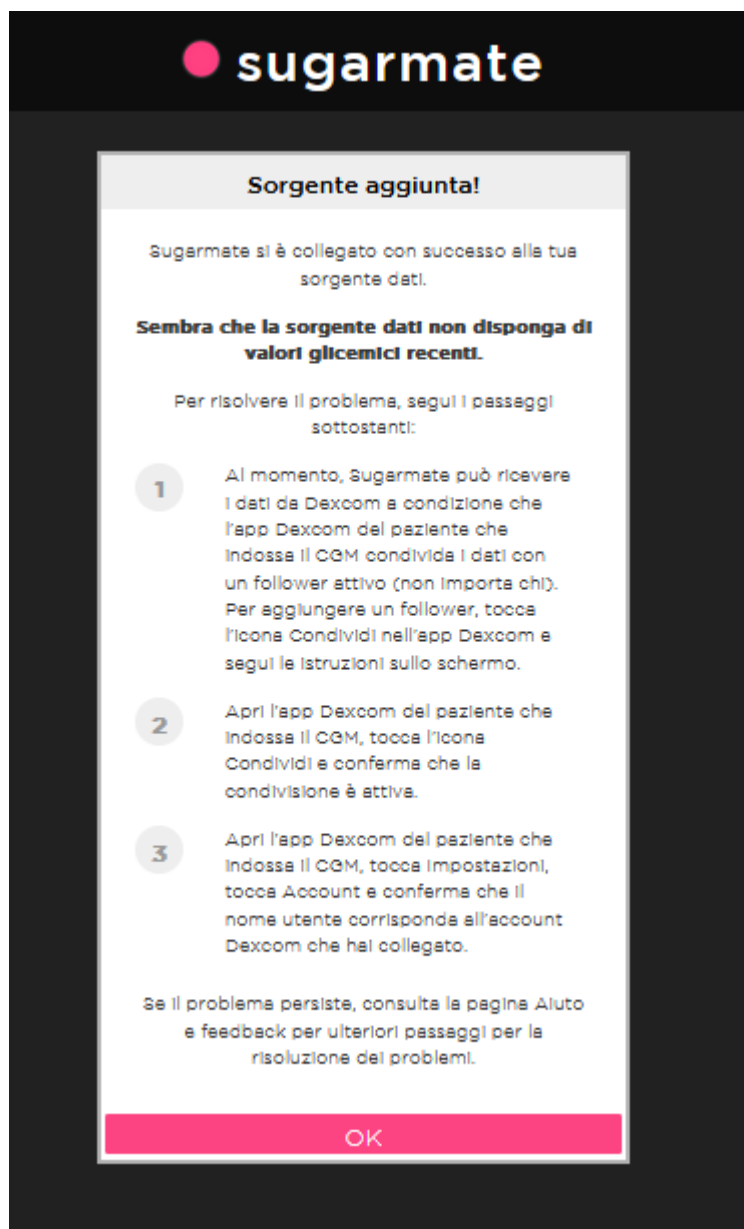

A breve dovresti vedere la glicemia in Sugarmate.

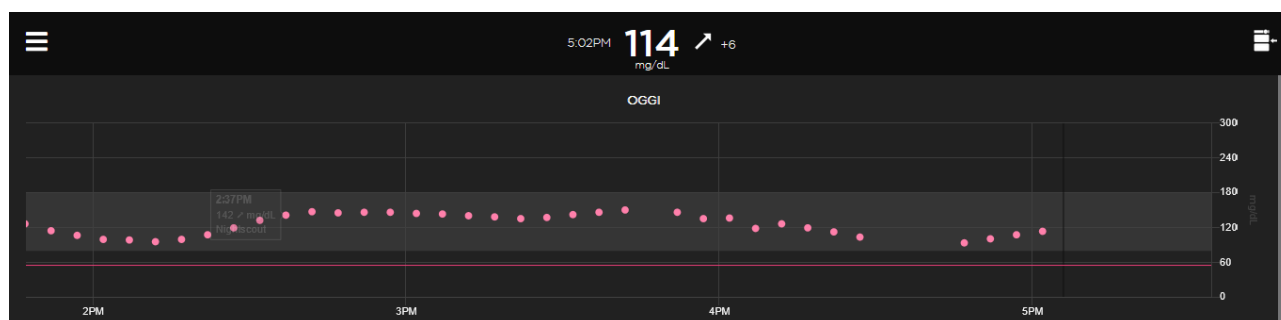


L'utilizzo è soggetto all'assunzione di esclusiva responsabilità personale.

3. Aggiungi sorgente dati Nightscout/Gluuro

Clicca su **Connetti con Nightscout**




Conferma, acconsenti e clicca **OK**

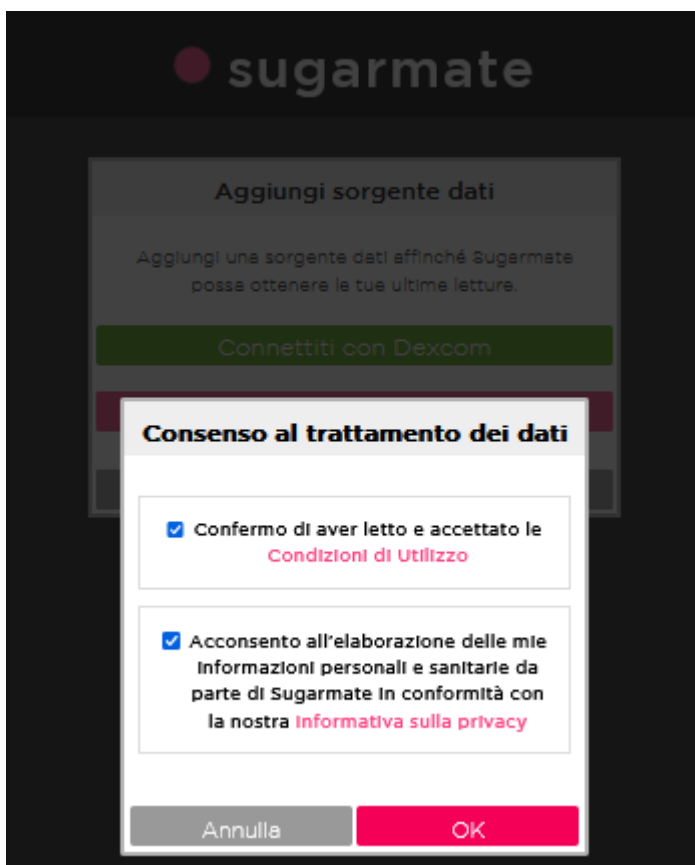

L'utilizzo è soggetto all'assunzione di esclusiva responsabilità personale.

Inserisci il tuo indirizzo **Nightscout/Glueroo** nel campo **URL di Nightscout** e la tua **Api_secret Nightscout/Glueroo** nel campo **Token di autenticazione**

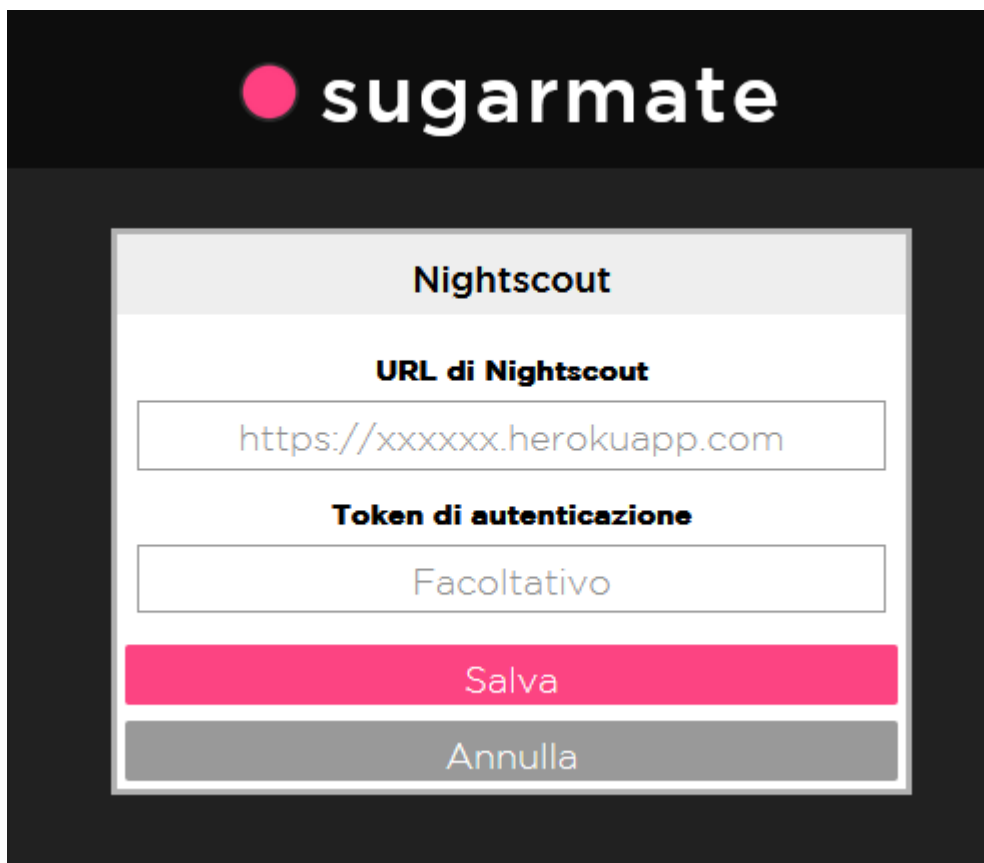

The screenshot shows the 'sugarmate' app interface. At the top, the 'Nightscout' title is displayed. Below it, there are two input fields: 'URL di Nightscout' containing 'https://xxxxxx.herokuapp.com' and 'Token di autenticazione' containing 'Facoltativo'. At the bottom, there are two buttons: a pink 'Salva' button and a grey 'Annulla' button.

Verrà visualizzata la schermata Sorgente aggiunta correttamente e verranno visualizzati i passaggi da seguire in assenza dei dati come per sorgente Dexcom.

A breve dovresti vedere la glicemia in Sugarmate.

